



Produto	CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (INSEMI CATH).
Modelo do Produto Médico	J-IUIC-351304
Nome Técnico	CATETERES
Registro Cadastro	10330710070
Origem do Produto	Fabricante: Cook Incorporated - EUA
Classificação de Risco	I – BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

1. APRESENTAÇÃO



ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

Embalagem primária: composta por filme poliéster, polietileno e Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão

A tabela abaixo apresenta as características dimensionais do produto:

Código	Cateter (fr x cm)	Posicionador
J-IUIC-351304	5 x 26	Sim

2. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO



DESCRIÇÃO

O Cateter de Inseminação Intra- Uterina é oferecido com 1 unidade na embalagem.



COMPOSIÇÃO


Componente	Parte	Material
Cateter	Tubo	Nylon
Posicionador	Tubo	Vinil

3. INDICAÇÃO

O Cateter de Inseminação Intrauterina (Insemi Cath) é utilizado para fazer a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina.

4. INSTRUÇÕES DE USO

- I. Molde o cateter para a forma desejada, caso se aplique;
- II. Coloque a extremidade alargada ou o conector Luer Slip do cateter na seringa e encha o cateter com solução de esperma lavado.
- III. Coloque a paciente em posição de supinação, com os pés apoios da marca ginecológica.
- IV. Insira o espéculo vaginal para expor o colo uterino.
- V. Posicione o cateter através do colo do útero, para dentro do útero.
- VI. O conteúdo em seguida, é colocado dentro do útero da paciente
- VII. Retire e descarte o conjunto de seringa/cateter.

	DESCRIPTIVO TÉCNICO	DTU_0070_092019
	CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRA UTERINA (INSEMI CATH)	Revisão 01
		Página 3 de 3

5. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, CONTRAINDICAÇÕES.

ADVERTÊNCIAS

“PROIBIDO REPROCESSAR”

PRECAUÇÕES

Embalagem esterilizada. Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada.

RESTRIÇÕES

Lei federal dos EUA restringe a venda destes produtos para ou por ordem médica.

CONTRAINDICAÇÕES

Este dispositivo não pode ser usado em pacientes com infecção vaginal ou intra-uterina ativa, doença sexualmente transmissível, perfuração uterina recente, cesariana recente, gravidez ou se o paciente tiver um dispositivo intra-uterino.

6. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Este produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, em local protegido da luz, seco e fresco. Evite exposição prolongada à luz. Deve ser manipulado somente no ato da sua implantação em ambiente estéril. Descarte depois do uso.