	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0070_102019</b>
	<b>CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (INSEMI CATH)</b>	<b>Revisão 00</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

Produto	<b>CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (INSEMI CATH).</b>
Modelo do Produto Médico	J-IUIC-351304
Nome Técnico	CATETERES
Registro   Cadastro	<b>10330710070</b>
Classificação de Risco	I – BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**



O Cateter de Inseminação é fornecido esterilizado por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada. Não use o produto se houver dúvida se o produto é estéril. Evite a exposição prolongada à luz. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

Embalagem primária: Bolsa envoltória


Frente do material: Polietileno/Poliéster

Costas do material: Tyvek®

Embalagem secundária: caixa de papelão

Composição:

<b>Componente</b>	<b>Material</b>
Cateter	Polietileno
Posicionador ajustável	Silicone

	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0070_102019</b>
	<b>CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (INSEMI CATH)</b>	<b>Revisão 00</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

### **INDICAÇÃO DE USO**

Os Cateteres de Inseminação Intra-Uterina (Insemi Cath) são utilizados para introdução de espermatozoides lavados na cavidade uterina.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

- I. Molde o cateter para a forma desejada, caso se aplique;
- II. Coloque a extremidade alargada ou o conector Luer Slip do cateter na seringa e encha o cateter com solução de esperma lavado.
- III. Coloque a paciente em posição de supinação, com os pés apoiados da marca ginecológica.
- IV. Insira o espéculo vaginal para expor o colo uterino.
- V. Posicione o cateter através do colo do útero, para dentro do útero.
- VI. O conteúdo em seguida, é colocado dentro do útero da paciente
- VII. Retire e descarte o conjunto de seringa/cateter.

### **ADVERTÊNCIAS**

“PROIBIDO REPROCESSAR”

### **PRECAUÇÕES**

Embalagem esterilizada. Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada.

### **RESTRICÇÕES**

Lei federal dos EUA restringe a venda destes produtos para ou por ordem médica.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Este dispositivo não pode ser usado em pacientes com infecção vaginal ou intrauterina ativa, doenças sexualmente, perfuração uterina recente, cesariana recente, gravidez ou se o paciente tiver um dispositivo intrauterino ou houver suspeita de que tenha.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**



Armazene em local seco e fresco.

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a conformidade do produto durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o produto esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

### **PRAZO DE VALIDADE**

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

### **DADOS COMPLEMENTARES:**

Importador e Distribuidor no Brasil:

Handle Comércio de Equipamentos Médicos S.A

Avenida Santa Luzia, 801 – Jardim Sumaré

Cep: 14025-090 Ribeirão Preto SP

CNPJ: 54.756.242/0001-06

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

### **Responsável Técnica:**

Danielle Regina Roque Pita

CRF-SP 39.590

### **Fabricante Legal:**

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

### **Fabricante Real:**

Cook Incorporated

1100 West Morgan Street Spencer, Indiana 47450 EUA