




| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Produto | EXTRATOR N-SNARE |
| Modelo do Produto Médico | NSR-024115; NSR-045065-UDH |
| Nome Técnico | EXTRATOR DE CÁLCULO |
| Registro Cadastro | 10330710060 |
| Classificação de Risco | II – MÉDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

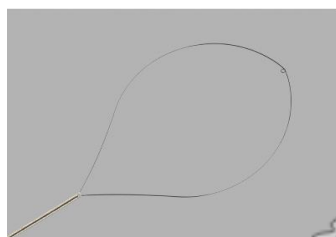

O Extrator N-Snare é fornecido esterilizado por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura.

Embalagem primária: é feita de uma composição de filme de poliéster e Tyvek®.

Embalagem secundária: Caixa de papelão

INDICAÇÃO DE USO

O Extrator N-Snare é utilizado para capturar e recuperar cateteres ou objetos estranhos dentro do trato urinário.

INSTRUÇÕES DE USO

- I. Insira o dispositivo no trato urinário através do canal de trabalho do endoscópio, em seguida avance o dispositivo de forma que a sua ponta fique



no nível ou um pouco além do objeto que será retirado, mantendo sempre a cesta fechada;

- II. Abra a cesta;
- III. Prenda o objeto na cesta,
- IV. Retire o endoscópio e o dispositivo separadamente ou os retire de uma única vez mantendo o objeto preso na cesta.

ADVERTÊNCIAS

- Este dispositivo é destinado ao uso médico com experiência em cirurgia urológica endoscópica.
- "PROIBIDO REPROCESSAR"

PRECAUÇÕES

- Trata-se de um material condutor. Evite o contato com instrumentos eletrificados.
- Se perceber resistência ao tentar remover cálculos ou outros corpos estranhos, solte-os. Não utilize força excessiva para manipular este material, o Cateter pode ser danificado.
- Não utilizar o material se a embalagem estéril estiver aberta ou danificada.
- Depois de retirar o produto da embalagem, inspecione-o para se certificar sua integridade para utilização.
- Envolver o dispositivo na bainha antes de remove-lo da bandeja.

RESTRICÇÕES

Lei federal dos EUA restringe a venda destes produtos para ou por ordem médica.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não são conhecidas

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco, fresco e escuro. O produto não deve ser exposto a temperatura e luz solares extremas. O produto deve ser armazenado a temperatura ambiente, entre 4°C e 29°C.

DADOS COMPLEMENTARES:

Importador e Distribuidor no Brasil:

Handle Comércio de Equipamentos Médicos S.A

Avenida Santa Luzia, 801 – Jardim Sumaré

Cep: 14025-090 Ribeirão Preto SP

CNPJ: 54.756.242/0001-06

www.handle.com.br

Responsável Técnica:

Danielle Regina Roque Pita

CRF-SP 39.590

Fabricante Legal:

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

Fabricante Real:

Cook Incorporated

1100 West Morgan Street Spencer, Indiana 47450 EUA