



Produto	AGULHA WILLIAMS PARA CISTOSCOPIA
Modelo do Produto Médico	090001; 090001-S9; 090001-S10; 090001-S26
Nome Técnico	AGULHAS
Registro Cadastro	10330710066
Origem do Produto	Fabricante: Cook Incorporated - EUA
Classificação de Risco	I – BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

1. APRESENTAÇÃO



ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

Embalagens de fácil abertura. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

Embalagem primária: Bolsa envoltória

Frente do material: Polietileno/Poliéster

Costas do material: Tyvek®

Embalagem secundária: caixa de papelão

A tabela abaixo apresenta as características dimensionais dos modelos:

Código	Diâmetro da Agulha (fr)	Agulha (gauge)	Comprimento da Agulha (cm)	Comprimento da Ponta (mm)
090001-S10	3.7	23	35	8
090001	5	23	35	8
090001-S26	5	23	45	8
090001-S9	5	25	35	8



2. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

A Agulha Williams para Cistoscopia, é uma agulha de injeção semirrígida usada para aplicação de substâncias/soluções na uretra e/ou bexiga.

O produto é oferecido em embalagem estéril contendo 1 unidade.



COMPOSIÇÃO

Componente	Material
Luer Lock	Poliamida
Capa do Conector	Poliamida
Cânula	Aço Inox
Agulha	Aço Inox

3. INDICAÇÃO DE USO


As Agulhas Williams para Cistoscopia são utilizadas para injeção cistoscópica na uretra, no colo da bexiga e na parede da bexiga.

4. INSTRUÇÕES DE USO

- I. Prenda firmemente uma seringa pré-cheia no encaixe Luer Lock no dispositivo e, em seguida, remova o ar da agulha. Verifique se há permeabilidades e vazamentos.
- II. Com o cistoscópio já colocado na uretra, introduza a agulha no canal de trabalho do cistoscópio.
- III. Avance a agulha com cuidado até que sua extremidade distal seja visualizada no monitor de vídeo cirurgia.

Nota: A agulha não deve ser avançada 5 cm a mais do final do escopo.

- IV. Cistoscopicamente visualize o local de injeção desejado e mantenha a posição do cistoscópio.
- V. Avance a agulha para o local de injeção pretendido.
- VI. Realize injeções no(s) local (is) desejado (s).

	DESCRITIVO TÉCNICO	DTU_0066_072020
	AGULHA WILLIAMS PARA CISTOSCOPIA	Revisão 02
		Página 4 de 4

6. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a sua conformidade durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o mesmo esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

Cópia Não Controlada