



Produto	BOLSA COLETORA LAPSAC
Modelo do Produto Médico	J-LS-050200; J-LS-050201; J-LS-050202; J-LS-060401; J-LS-080500; J-LS-081000
Nome Técnico	BOLSAS COLETORAS
Notificação	10330719011
Classificação de Risco	II – MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



A Bolsa Coletora Lapsac é fornecida esterilizada por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

Embalagem primária: Bolsa envoltória


Frente do material: Polietileno/Poliéster

Costas do material: Tyvek®

Embalagem secundária: caixa de papelão

Composição:

Componente	Material
Bolsa	Nylon
Revestimento Interno	Poliuretano
Cordão de Fixação	Polipropileno

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9011_022021
	BOLSA COLETORA LAPSAC	Revisão 02
		Página 2 de 3

INDICAÇÃO DE USO

A Bolsa Coletora LapSac é utilizada para isolar tecido durante ou antes da remoção cirúrgica.

INSTRUÇÕES DE USO

- I. Utilizando de técnica asséptica, insira a Bolsa Coletora Lapsac na cavidade abdominal.
- II. Coloque o tecido a ser removido do corpo, no interior da bolsa.
- III. Feche a bolsa com cuidado utilizando o cordão de fixação. Não use força excessiva, o cordão pode arrebentar e a bolsa rasgar.
- IV. Retire a Bolsa Coletora Lapsac do corpo com cuidado para não derramar seu conteúdo.

ADVERTÊNCIAS

- A Bolsa Coletora Lapsac não deve ser utilizada com instrumentos cirúrgicos afiados cortantes.
- Deve se ter cuidado para não danificar, perfurar ou rasgar a bolsa.
- Proceder com cuidado ao remover tecidos potencialmente malignos ou perigosos para evitar a contaminação do tecido circundante.
- “PROIBIDO REPROCESSAR”

PRECAUÇÕES

- Os produtos são restritos para profissionais da área médica.


CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilize com morceladores elétricos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a sua conformidade durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o mesmo esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9011_022021
	BOLSA COLETORA LAPSAC	Revisão 02
		Página 3 de 3

PRAZO DE VALIDADE

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

ATENÇÃO: Observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail qualidade@handle.com.br.

DADOS COMPLEMENTARES:

Importado/Distribuído por: Handle Comércio de Equipamentos Médicos S.A.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Av. Sta. Luzia, 801 /Jd. Sumaré

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14025-090 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Responsável Técnica:

Danielle Regina Roque Pita

CRF-SP 39.590

Fabricante:

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA