



Produto	BOLSA COLETORA LAPSAC
Modelo do Produto Médico	J-LS-050200; J-LS-050201; J-LS-050202; J-LS-060401; J-LS-080500; J-LS-081000
Nome Técnico	BOLSAS COLETORAS
Notificação	10330719011
Classificação de Risco	II – MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



A Bolsa Coletora Lapsac é fornecida esterilizada por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

Embalagem primária: bolsa envoltória.

Frente do material: Polietileno/Poliéster.

Costas do material: Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão.

Composição

Componente	Material
Bolsa	Nylon
Revestimento Interno	Poliuretano
Cordão de Fixação	Polipropileno



Referência	Dimensão (cm)	Volume (ml)
J-LS-050200	5.08 X 12.7	50
J-LS-050201	5.08 X 12.7	50
J-LS-050202	5.08 X 12.7	50
J-LS-060401	10.16 X 15.24	200
J-LS-080500	12.7 X 20.32	750
J-LS-081000	20.32 X 25.4	1,500

INDICAÇÃO DE USO


A Bolsa Coletora LapSac é utilizada para isolar tecido durante ou antes da remoção cirúrgica.

INSTRUÇÕES DE USO

- I. Utilizando de técnica asséptica, insira a Bolsa Coletora Lapsac na cavidade abdominal.
- II. Coloque o tecido a ser removido do corpo, no interior da bolsa.
- III. Feche a bolsa com cuidado utilizando o cordão de fixação. Não use força excessiva, o cordão pode arrebentar e a bolsa rasgar.
- IV. Retire a Bolsa Coletora Lapsac do corpo com cuidado para não derramar seu conteúdo.

ADVERTÊNCIAS

- A Bolsa Coletora Lapsac não deve ser utilizada com instrumentos cirúrgicos afiados cortantes.
- Deve se ter cuidado para não danificar, perfurar ou rasgar a bolsa.
- Proceder com cuidado ao remover tecidos potencialmente malignos ou perigosos para evitar a contaminação do tecido circundante.
- “PROIBIDO REPROCESSAR”.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9011_022021
	BOLSA COLETORA LAPSAC	Revisão 03
		Página 3 de 4

PRECAUÇÕES

Os produtos são restritos para profissionais da área médica.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize com morceladores elétricos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a sua conformidade durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o mesmo esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

PRAZO DE VALIDADE

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

ATENÇÃO: observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail qualidade@handle.com.br.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro
Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

**Fabricante:**

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

Cópia Não Controlada