
	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_9019_042024</b>
	<b>CÂNULA EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL PERC NCIRCLE®</b>	<b>Revisão 01</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

Produto	<b>CÂNULA EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL PERC NCIRCLE®</b>
Modelo do Produto Médico	<b>NTRSE-100038</b>
Nome Técnico	EXTRATOR DE CÁLCULO
Registro	<b>10330719019</b>
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

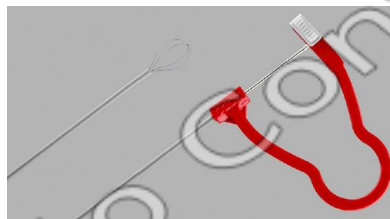

A Cântula Extratora de Cálculos Nitinol Perc NCircle®, é fornecido estéril em embalagem unitária de fácil abertura.

Embalagem primária: bolsa envoltória.

Frente do material: Polietileno/Poliéster.

Costas do material: Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão.

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O mecanismo de implantação na extremidade proximal do dispositivo é projetado com uma manopla removível que permite ao médico remover a manopla e a cântula sem que ocorra a migração de cálculo. A compressão da alça permite a implantação da cesta.

O extrator de Cálculo Perc NCircle® é fabricado com uma cântula externa de aço inoxidável 10 Fr e mede 38 centímetros. O cesto é fabricado em nitinol e mede 2,0 centímetros de diâmetro quando implantado. O diâmetro da cesta ajuda a manter um campo de trabalho claro para manipulação dos cálculos ou fragmentos maiores.



Referência	Diâmetro do Cateter	Comprimento	Diâmetro da Cesta
NTRSE-100038	10 Fr	38 cm	2 cm

### **INDICAÇÃO DE USO**

A Cânula Extratora de Cálculos Nitinol Perc NCircle® é utilizada na extração de cálculos e objetos estranhos nos rins e na bexiga.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

- I. Utilizando o acesso ao rim/bexiga, introduza o endoscópio.
- II. Introduza o extrator no interior do canal de trabalho do endoscópio até a ponta distal ficar visível.
- III. Através de visualização direta, localize o cálculo e aperte a manopla vermelha para abrir a cesta e pegar o cálculo.
- IV. Solte lentamente a manopla de modo a fechar o cálculo.
- V. Retire lentamente o endoscópio e o extrator simultâneo.
- VI. Depois de retirar o extrator do paciente, aperte a manopla vermelha para soltar o cálculo.
- VII. Repita os passos acima conforme necessário para extração de outros cálculos.

### **ADVERTÊNCIAS**

" PROIBIDO REPROCESSAR".

### **PRECAUÇÕES**

- Estéril se a embalagem não estiver danificada. Não use se a embalagem estiver danificada.
- Este dispositivo é condutor. Evite o contato com qualquer instrumento eletrificado.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não encontradas.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

**PRAZO DE VALIDADE**

O produto possui validade de 3 anos.

**DADOS COMPLEMENTARES:**

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

**Fabricante:**

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

Cópia Não Controlada