
	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9020_042024
	CÂNULA OCLUSORA E EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL NTRAP®	Revisão 01
		Página 1 de 4

Produto	CÂNULA OCLUSORA E EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL NTRAP®
Modelo do Produto Médico	NTP-028145
Nome Técnico	EXTRATOR DE CÁLCULO
Registro	10330719020
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

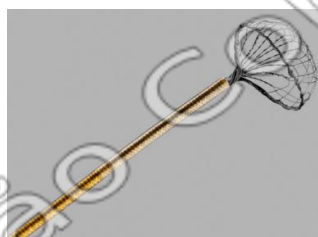

A Cãnula Oclusora e Extratora de Cálculos Nitinol NTrap®, é fornecido estéril em embalagem unitária de fácil abertura.


Embalagem primária: bolsa envoltória.

Frente do material: Polietileno/Poliéster.

Costas do material: Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão.

Referência	Tamanho da ponta da bainha	Diâmetro do cateter	Comprimento	Configuração da cesta
NTP-028145	3 Fr	2.8 Fr	145 cm	Design de guarda-chuva de 7 mm

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9020_042024
	CÂNULA OCLUSORA E EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL NTRAP®	Revisão 01
		Página 2 de 4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A manopla do extrator está localizada na extremidade proximal do cesto e é utilizada na abertura e fechamento do cesto. O dispositivo de extração de cálculos NTrap® também inclui um insersor de poliamida que tem a função de interligar uma peça a outra.

A Cânula Oclusora e Extratora de cálculos Nitinol NTrap® é fabricado com material de nitinol, com diâmetro de 2,8 Fr e comprimento de 145 centímetros.

O fio trançado de nitinol se estende a partir da cânula e forma o cesto NTrap. Os fios entrelaçados formam o design do guarda-chuva de 7 milímetros.

INDICAÇÃO DE USO


O extrator NTrap® é utilizado como um dispositivo de captura e extração endoscópica para cálculos e outros corpos estranhos no trato urinário, e para minimizar a migração de cálculo durante a litotripsia a laser, ultrassônica, eletro-hidráulica ou pneumática.

INSTRUÇÕES DE USO

- I. Utilizando uma técnica asséptica, retire o extrator NTrap® da embalagem e coloque-o em um campo estéril.
- II. Antes da inserção, recolha o cesto do NTrap para dentro da bainha.
- III. Através de visualização direta ou fluoroscopia, avance a bainha do NTrap para além do cálculo ou do objeto estranho antes da expansão da cesta.
- IV. Expanda o NTrap avançando o punho para frente enquanto segura a bainha na posição. O dispositivo pode agora ser usado para minimizar a migração dos cálculos durante a litotripsia a laser, por ultra-som, eletro-hidráulica ou pneumática.

NOTA: quando utilizar laser ou litotripsia eletro-hidráulica, deve manter uma folga de pelo menos 1 cm entre o cálculo e o NTrap para impedir danos no dispositivo.

NOTA: na posição aberta, o NTrap pode ser utilizado como dispositivo de extração para varrimento do ureter, recolhendo fragmentos de cálculo para a bexiga. O punho operacional pode ser separado para facilitar a remoção do endoscópio.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_9020_042024
	CÂNULA OCLUSORA E EXTRATORA DE CÁLCULOS NITINOL NTRAP®	Revisão 01
		Página 3 de 4

- V. Quando concluir o procedimento, feche o cesto do NTrap empurrando a bainha para frente enquanto segura o punho de operação em posição.
- VI. Antes de fechar o cesto, pode ser necessário avançar suavemente para soltar eventuais fragmentos de cálculos restantes.

ADVERTÊNCIAS

" PROIBIDO REPROCESSAR".

PRECAUÇÕES

- Os médicos devem estar familiarizados e ter experiência em cirurgia endoscópica urológica;
- Avalie os cálculos ou outros corpos estranhos antes da expansão do instrumento para garantir que o objeto não é muito grande para ser removido através das vias anatómicas;
- Se sentir resistência ao tentar remover cálculo ou outros corpos estranhos, solte o objeto. Não exerça uma força excessiva sobre o dispositivo;
- Devido à natureza assimétrica do NTrap, não torça nem gire o dispositivo
- Quando utilizado em conjunto com laser de hólmio: YAG, não dispare o laser diretamente para o dispositivo;
- Este dispositivo é condutor. Evite o contato com instrumentos elétricos;
- Envolver o dispositivo na bainha antes de remover do tabuleiro.

CONTRAINDICAÇÕES

Não encontradas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

**PRAZO DE VALIDADE**

O produto possui validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

Cópia Não Controlada