

	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0064_042024</b>
	<b>CÂNULA EXTRATORA DE CÁLCULO EM AÇO INOX</b>	<b>Revisão 03</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

Produto	<b>CÂNULA EXTRATORA DE CÁLCULO EM AÇO INOX</b>
Modelo do Produto Médico	<b>ATLAS WIRE™: AE-417115; AE-432115</b> <b>CAPTURA®: CE-328115; CE-332115; CE-428115; CE-432115</b>
Nome Técnico	CANULAS
Notificação	<b>10330710064</b>
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**



**Figura 1:** Atlas Wire™



**Figura 3:** Captura®

Fornecido esterilizado por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada. Não use o produto se houver dúvida quanto a esterilidade. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

A embalagem contém 1 (uma) unidade do produto.

Embalagem primária: bandeja de retenção PETG - Polietileno Tereftalato Glicol.

Bolsa envoltória: frente do material - Polietileno/Poliéster de Baixa Densidade

Costa do material - Tyvek® Dupont 1073B.

Embalagem secundária: caixa de papelão.

**Tabela comparativa**

Referência (Atlas Wire®)	Tamanho (Fr x cm)	Configuração da cesta
AE-417115	1.7 x 115	4 fios
AE-428115	2.8 x 115	4 fios
AE-432115	3.2 x 115	4 fios

Referência (Captura® Helicoidal)	Tamanho (Fr x cm)	Configuração da cesta
CE-328115	2.8 x 115	3 fios
CE-332115	3.2 x 115	3 fios
CE-428115	2.8 x 115	4 fios
CE-432115	3.2 x 115	4 fios

**INDICAÇÃO DE USO**

As cânulas extratoras de cálculos são utilizadas para manipulação e remoção de cálculos no trato urinário.

**COMPOSIÇÃO**

Basket:

Cânula - Aço inoxidável AISI 304

Fio - Aço inoxidável 304V

Manopla:

Tubo - Teraftalato de Polietileno

Cânula - Aço inoxidável AISI 304

**INSTRUÇÕES DE USO**

- I. Insira o extrator através do canal de trabalho do ureteroscópio;
- II. Mantenha o cesto fechado avance o extrator de modo que ultrapasse o limite do fragmento que será extraído;



- III. Abra a cesta puxando o gatilho manopla com o polegar no sentido proximal;
- IV. Prenda o fragmento dentro da cesta, e de modo seguro feche a cesta empurrando o gatilho da manopla com o polegar no sentido distal;
- V. Remova o Extrator com os fragmentos;
- VI. Repita os passos acima se necessário.

### **ADVERTÊNCIAS**

"PROIBIDO REPROCESSAR".

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazene o produto em local seco e fresco. Evite exposições prolongadas à luz.

Temperatura: 11 °C - 32 °C e Umidade: 10% - 85%.

**ATENÇÃO:** observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail [qualidade@handle.com.br](mailto:qualidade@handle.com.br).

### **DADOS COMPLEMENTARES:**

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ [qualidade@handle.com.br](mailto:qualidade@handle.com.br)

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

### **Fabricante:**

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA