




Produto	CATETER URETERAL
Modelo do Produto Médico	020013, 020014, 020015, 020116, 020017, 020018, 020040-C5, 020040-C6.
Nome Técnico	CATETERES
Notificação	10330710095
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



Cateter Ureteral Ponta Cone

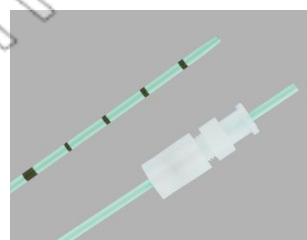

Cateter Ureteral Extremidade Aberta

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

Embalagem primária: é feita de uma composição de filme de poliéster e Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão.



Código	Cateter de Ureteral (Fr x cm)	Configuração da Ponta
020013	3.0 x 70	Extremidade Aberta
020014	4.0 x 70	Extremidade Aberta
020015	5.0 x 70	Extremidade Aberta
020116	6.0 x 70	Extremidade Aberta
020017	7.0 x 70	Extremidade Aberta
020018	8.0 x 70	Extremidade Aberta
020040-C5	5.0 x 70	Extremidade Aberta
020040-C6	6.0 x 70	Extremidade Aberta

INDICAÇÃO DE USO


O Cateter Ureteral é utilizado para piletografia e injeções de meio de contraste. Classificado como de uso transitório (< 60 min).

INSTRUÇÕES DE USO

- I. Passe o fio guia de tamanho adequado para dentro da pélvis renal
- II. Passe o cateter ureteral, através do ureter.
- III. Mantendo a posição do cateter, conecte a seringa para FLLA e injete os meios de contraste.
- IV. Após a remoção da seringa, conecte o cateter a um saco de drenagem
- V. Retire e os elimine.

ADVERTÊNCIAS

- Este dispositivo deverá ser utilizado apenas por profissionais habilitados;
- Produto estéril, não utilize o produto se houver dano na embalagem;
- "PROIBIDO REPROCESSAR".

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_0095_042024
	CATETER URETERAL	Revisão 02
		Página 3 de 3

PRECAUÇÕES

- Utilize o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Não utilize o produto se estiver fora do período de validade;
- Tempo de permanência: uso transitório (< 60 min).

CONTRAINDICAÇÕES

Não conhecidas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em embalagem fechada, em local fresco e seco, a temperatura ambiente de 15 a 30°C. Evitar exposição ao excesso de calor e umidade.

PRAZO DE VALIDADE

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

ATENÇÃO: observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail qualidade@handle.com.br.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro
Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA