



Produto	CATETER URETERAL PONTA ANGULADA
Modelo do Produto Médico	023105, 023106.
Nome Técnico	CATETERES
Notificação	10330710097
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



Fornecido esterilizado por gás óxido de etileno em embalagens de fácil abertura. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada. Não use o produto se houver dúvida quanto a esterilidade. Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum dano ocorreu.

A embalagem contém 1 (uma) unidade do conjunto.

Embalagem primária: bolsa envoltória.

Frente do material: Polietileno/Poliéster.

Costas do material: Tyvek®.

Embalagem secundária: caixa de papelão.



Referência	Cateter (Fr x cm)	Tipo da ponta	Ângulo da ponta	Fio guia (inch x cm)
023105	5 x 70	cônica	20°	0.035 x 145
023106	6 x 70	cônica	20°	0.035 x 145

INDICAÇÃO DE USO

O Cateter Ureteral Ponta Angulada destina-se ao acesso e cateterização do trato urinário, incluindo entrega de meios de contraste, navegação de um ureter tortuoso e acesso, avanço ou troca de fio guia.

INSTRUÇÕES DE USO

Colocação do cateter com o fio guia

- I. Coloque o cistoscópio dentro da bexiga para localizar o orifício ureteral.
- II. Preencha o cateter ureteral com uma solução fisiológica 0,9%.
- III. Avance o cateter através do cistoscópio e para dentro da bexiga.
- IV. Avance o fio-guia através do cateter. Avance ligeiramente e retraia o fio-guia para ajudar a obter acesso ao orifício ureteral e ao ureter.
- V. Assim que o fio for avançado no ureter, avance o cateter sobre o fio e até o local desejado dentro do ureter.
- VI. Remova o fio guia.
- VII. Sob fluoroscopia, injete meio de contraste através do cateter para visualizar o ureter e determinar a intervenção necessária.

Percutânea

- I. Lave o cateter.
- II. Com um fio guia já colocado na pelve renal, avance o cateter sobre o fio guia e na pelve renal.
- III. Retraia o fio guia para permitir que a ponta do cateter se forme.
- IV. Avance o cateter até o local desejado na pelve renal. Avance ligeiramente e retraia o fio guia para ajudar a navegar no cateter.

**ADVERTÊNCIAS**

"PROIBIDO REPROCESSAR".

PRECAUÇÕES

- Este produto deve ser usado por médicos treinados e experientes em técnicas de acesso ureteral. Técnicas padrões devem ser empregadas.
- Evite dobrar o cateter antes de colocá-lo. Isso pode danificar a integridade do cateter e resultar em lesões ao paciente.
- Se você encontrar resistência ao avançar ou retirar o cateter, pare e determine a causa antes de prosseguir.
- Não retire o cateter enquanto ele estiver desviado no cistoscópio / endoscópio.

CONTRAINDICAÇÕES

Este dispositivo é contraindicado para uso em pacientes inadequados para cateterismo.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco e fresco. Evite exposições prolongadas à luz.


O Cateter Ureteral com Ponta Angulada deve ser armazenado em Temperatura:

11°C - 32°C e Umidade: 10% - 85%.

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a conformidade do produto durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o produto esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

PRAZO DE VALIDADE

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_0097_042024
	CATETER URETERAL PONTA ANGULADA	Revisão 03
		Página 4 de 4

ATENÇÃO: observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail qualidade@handle.com.br.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro
Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA

Cópia Não Controlada