	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0114_042024</b>
	<b>CATETER DE DRENAGEM MALECOT UNIVERSA® COM CONJUNTO INTRODUTOR UMCS-16-30</b>	<b>Revisão 03</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

Produto	<b>CATETER DE DRENAGEM MALECOT UNIVERSA® COM CONJUNTO INTRODUTOR UMCS-16-30</b>
Modelo do Produto Médico	<b>UMCS-16-30</b>
Nome Técnico	CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA
Notificação	<b>10330710114</b>
Classificação de Risco	II – MÉDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**



ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

O Cateter de Drenagem Malecot Universa® com Conjunto Introduutor UMCS-16-30, é fornecido estéril em embalagem unitária de fácil abertura.

A embalagem contém uma unidade do conjunto

#### **Composição da Embalagem Primária:**

Bandeja: Glicol de Tereftalato de Polietileno.

Bolsa envoltória - Frente do material: Polietileno/ Poliester.

- Costas do material: Tyvek®.

**Embalagem secundária:** caixa de papelão.

### **INDICAÇÃO DE USO**


O Cateter de Drenagem Malecot Universa® com Conjunto Introduutor destina-se a drenagem de urina percutânea do sistema gênito-urinário.



Referência	Cateter (Fr x cm)	Agulha trocatador com obturador  (ga x cm)	Fio guia (inch x cm)	Estilete com retificação  (Fr x cm)	Tubo conector com torneira  (Fr x cm)	Dilatador  (Fr x cm)
UMCS-16-30	16 X 30	18 X 20	0.038" x 100	10 x 34	18 x 30	6/8/10/12/ 14/16/18  x 20

### INSTRUÇÕES DE USO

- I. Abra e remova a bandeja de embalagem da bolsa estéril.
- II. Identifique e anestesia o local da pele sobrejacente ao sistema coletor/bexiga.
- III. Sob fluoroscopia ou ultrassom, utilize uma técnica percutânea padrão para puncionar e passar um fio guia no sistema coletor/bexiga. Confirme a colocação observando um fluxo de urina desobstruído.
- IV. Para facilitar a passagem do cateter, dilate o trato musculofacial utilizando dilatadores do menor para o maior.
- V. Monte o cateter de drenagem junto ao estilete de retificação e prenda com Luer Lock.
- VI. Avance o conjunto estilete e cateter sobre a extremidade rígida do fio guia e o introduza até o sistema coletor.
- VII. Confirme a posição do cateter através de fluoroscopia ou ultrassom.
- VIII. Destrave o estilete, gire suavemente e remova o estilete.
- IX. Segure o cateter com firmeza na posição adequada e remova o fio guia.
- X. Confirme a posição do cateter através de fluoroscopia ou ultrassom novamente.
- XI. Utilize o disco de retenção para prender o cateter a pele, prenda o cateter ao disco com o atilho de plástico.
- XII. Fixe o cateter com fita adesiva, sutura e pensos, conforme necessário.
- XIII. Prenda o tubo de ligação ao cateter e ao saco de drenagem.
- XIV. Guarde o estilete flexível, embalado individualmente, para remoção do cateter.

	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0114_042024</b>
	<b>CATETER DE DRENAGEM MALECOT UNIVERSA® COM CONJUNTO INTRODUTOR UMCS-16-30</b>	<b>Revisão 03</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

### REMOÇÃO DE CATETER

- I. Coloque o estilete de retificação no cateter e prenda com o Luer Lock de modo a endireitar as asas Malecot.
- II. Se desejar, pode passar um fio guia para o sistema de coleta/bexiga para manter o acesso, depois do estilete ser engatado e antes da remoção do cateter.
- III. Retire o cateter.

### ADVERTÊNCIAS

- A utilização deste dispositivo deve ser feita por médicos com formação e experiência em acesso percutânea e introdução de Cateteres de Drenagem. Técnicas padrão devem ser empregadas.
- “PROIBIDO REPROCESSAR”.

### PRECAUÇÕES

- O tempo de permanência do Cateter não deve ultrapassar 4 (quatro) semanas.
- Não é recomendado forçar qualquer componente durante a remoção ou substituição do cateter. Remova cuidadosamente os componentes caso seja encontrado alguma resistência.

### RESTRICÇÕES

- Lei federal dos EUA restringe a venda destes produtos para ou por ordem médica.

### CONTRAINDICAÇÕES

- Não são conhecidas.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições prolongadas à luz.

	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_0114_042024</b>
	<b>CATETER DE DRENAGEM MALECOT UNIVERSA® COM CONJUNTO INTRODUTOR UMCS-16-30</b>	<b>Revisão 03</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar a sua conformidade durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o mesmo esteja seguro e feito de maneira a minimizar o movimento do produto durante o transporte.

**ATENÇÃO: observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail [qualidade@handle.com.br](mailto:qualidade@handle.com.br).**

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro  
Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ [qualidade@handle.com.br](mailto:qualidade@handle.com.br)

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

**Fabricante:**

Cook Incorporated

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA